



therapist[®] 150 plus

Magnetoterapia professionale

- Dispositivo medico per magnetoterapia a campi magnetici pulsati fino a **150 Gauss**
- Ideale per uso professionale e noleggio
- Tecnologia Bluetooth[®] e APP dedicata
- 2 programmi universali a codice variabile, per tutti i trattamenti, o programmabile tramite APP
- Tecnologia brevettata con solenoide integrato
- Senza fasce, fili o accessori esterni
- Batteria ricaricabile per permettere la mobilità
- Design iconico e funzionale di dimensioni ridotte
- Semplice da utilizzare, con segnale acustico di impostazione funzioni e fine trattamento

THERAPIST[®] 150 PLUS è un dispositivo medico brevettato (con solenoide integrato) e made in Italy per la magnetoterapia. Rispetto ai dispositivi tradizionali, di dimensioni e peso superiori, garantisce una migliore compliance alla terapia del paziente con eccellenti risultati grazie a una potenza fino a **150 Gauss**.

È dotato di 2 programmi universali (Dolore Acuto o Dolore Cronico) a codice variabile in grado coprire tutte le maggiori esigenze terapeutiche.

THERAPIST[®] 150 PLUS è munito della tecnologia Bluetooth[®] e APP per la gestione e la programmazione del dispositivo.

Per esigenze terapeutiche particolari o prescrizioni specifiche è possibile preimpostare il dispositivo tramite APP.

Per queste sue caratteristiche THERAPIST[®] 150 PLUS è raccomandato per **uso professionale o per il noleggio**.

Grazie alle dimensioni tascabili, alla sua leggerezza, alla batteria di lunga durata può essere portato ovunque e indossato comodamente anche sopra i vestiti e il gesso.

Per il suo design iconico, la sua ergonomia e l'estrema semplicità d'uso rappresenta una vera rivoluzione nel contrasto a dolori, traumi e fratture.



Magnetoterapia a campi magnetici pulsati



Potenza testata



Tecnologia brevettata

2 FASCE ELASTICHE

DA POSIZIONARE DIRETTAMENTE SULLA ZONA DA TRATTARE, SOPRA IL VESTITO O IL GESSO.



Cod. 10592
THERAPIST[®] 150 PLUS



8 388777 458210

THERAPIST® è dotato di 2 programmi preimpostati a codice variabile (DOLORE ACUTO - DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE).


Diversamente dai dispositivi con programmi tradizionali, THERAPIST effettua una scansione dei parametri terapeutici in base alla patologia da trattare garantendo un trattamento efficace e un'estrema facilità d'uso per il paziente.

P1 PROGRAMMA DOLORE ACUTO


- Artrite reumatoide
- Sindrome del tunnel carpale
- Periartriti e Tendiniti
- Lombalgia, Lombosciatalgia e Cervicobrachialgia acuta
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia acuta
- Neuropatie acute
- Traumi muscolari o articolari
- Reumatismi muscolari

P2 PROGRAMMA DOLORE CRONICO E PATOLOGIE OSSEE

- Artrosi
- Fibromialgia
- Fratture, Malattie dell'osso, Osteoporosi
- Lombalgia, Lombosciatalgia e Cervicobrachialgia cronica
- Morbo di Sudeck/Algodistrofia cronica
- Neuropatie croniche
- Traumi muscolari o articolari
- Affaticamento muscolare da sport

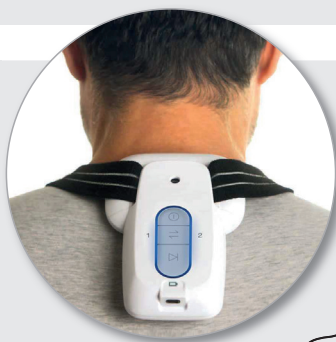

ESEMPI DI APPLICAZIONE: collo, spalla, schiena, ginocchio, gomito

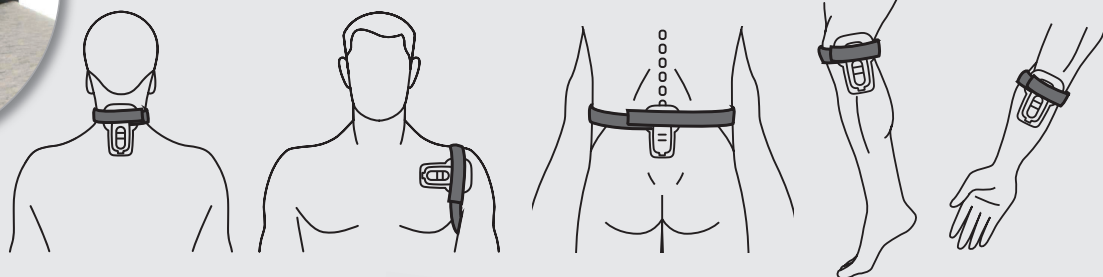

Dotazione

Unità per magnetoterapia,
2 fasce elastiche,
alimentatore, manuale d'uso.



Scarica
la app



App dedicata

THERAPIST® 150 PLUS
è un dispositivo smart!
Grazie alla sua APP
comunica con lo smartphone e ne permette
la programmazione.



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentatori compatibili:	Mod. SAW20-050-2400GD
Tensione di alimentazione:	100-240 Vac; 50/60 Hz; alimentatore non medicale
Assorbimento:	0,6 A
Tensione di uscita:	5 Vdc 2,4 A
Batteria ricaricabile tipo Li-Pol:	3,7 Vdc 1900 mAh
Tempo ricarica:	4 ore circa
Frequenza di pilotaggio del diffusore (integrato nel dispositivo):	da 5 a 500 [Hz] $\pm 20\%$.
Intensità magnetica massima (Valore picco)	150 [Gauss] $\pm 20\%$ per canale
Classificazione rispetto all'ingresso di polvere e liquidi:	IP22
Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura da +5 a +40 °C Umidità relativa da 15% a 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
Condizioni ambientali di trasporto e stoccaggio:	Temperatura da -20 a + 60 °C Umidità relativa < 93% Pressione da 700 a 1060 hPa
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura minima dichiarata:	30 minuti
Tempo necessario affinché il dispositivo sia pronto per l'uso previsto, dalla temperatura massima dichiarata:	30 minuti
Dimensioni Apparecchio:	138 x 93 x 24 mm
Peso:	350 g

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

